



# Bruksanvisning AKA Free Hands

Regulerbart belte med funksjonelle festeanordninger for ganghjelpemiddel

Beskrivelse	Mål	HMS nr	Art. nr.	Spesifikasjon
Krykkebelte barn	L 42 - 85	301398	AKA-4-XS-S	Vanntett lomme med YKK glidelås
Krykkebelte voksen	L 55 - 113	301399	AKA-5-M-L	Vanntett lomme med YKK glidelps

## Produkt

AKA Free Hands krykkebelte

## Innhold

- 1 Belte med integrert vanntett lomme
- 2 bøyer for belteinnefestning
- 2 hesteskoklipps for krykkerør/flaskehals
- 2 strikk med belteklips for tett feste mot kropp
- 2 strikk med krok og sylinder for dynamisk innefestning
- 1 bruksanvisning

## Bruk

Belte med innfestning av krykker/stokk. Les gjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte.

## Advarsel

Krykker/stokk skal kun festes til beltet med medfølgende utstyr og på angitt måte som her i manualen. Dette for å sikre at krykkene kan løse ut hvis de blir sittende fast uønsket. Selve beltet løser ikke ut.

## Montering

Montering og justering kan utføres av den som bruker beltet. Barn bør få veiledning fra en voksen for å påse at monteringen er gjort riktig.

## Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig størrelse.
2. Les nøye gjennom instruksjonene.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Ta beltet rundt livet og fest spennen. Juster med å stramme båndene på begge sider av spennen. For at produktet skal fungere, må lommen være fremme på magen og spennen bak på ryggen når beltet er i bruk.
5. Fest den svarte runde strikken rundt krykken/stokken. Strikket skal festes rundt krykkerøret mellom håndleddstøtten og albuestøtten som en løkke. Bruk snorlåsen for å stramme strikken rundt krykkerøret.
6. Fest så strikken med krok, til den trekantede hempen i beltet.
7. Hvis en ønsker å kunne feste krykken helt tett inntil kroppen, monteres også belteklipset til krykkene/stokken. Fest båndet med påmontert belteklips i ønsket høyde rundt skaftet på krykken/stokken. Påse at båndet og belteklipsen sitter godt på og belteklips er riktig vei. Denne kan nå hektes i beltet eller i buksekanten når ønskelig, for å få krykken/stokken tett på kroppen. Ikke nødvendig å ta av den runde løse strikken som beskrevet i punkt 5-6.
8. Det medfølger også hesteskoklips i beltet. Dette klipset løses ut og festes rundt krykkehalsen og til klipset som monteres i beltet. Det samme klipset kan også brukes til å holde en drikkeflaske på tilsvarende måte. Ikke nødvendig å ta av den runde løse strikken som beskrevet i punkt 5-6.

NB: Den dynamiske innfestningen som stikken sitter i består av krok og sylinder. Dette utgjør en utløsermekanisme som gjør at strikken løsner fra kroken ved evt. hekking av krykken/stokken. For å sette sammen igjen strikken og kroken tar en først av plastsyylinder og trer den inn på strikken, trer så strikken inn i baksiden av kroken og skyver plastsyylinder tilbake til utgangspunktet.


### Vedlikehold

Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og strikk ukentlig. Kontroller at bånd og strikk er riktig festet.

### Vaskeanvisning: Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel




Montering punkt 5-6:

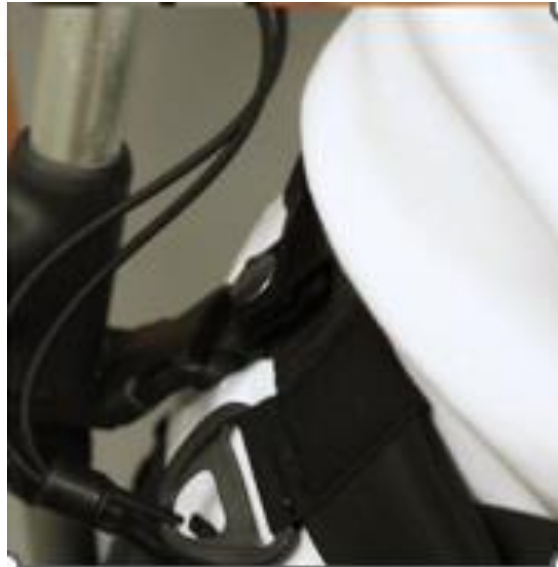


Montering punkt 7:



## Montering punk 8:

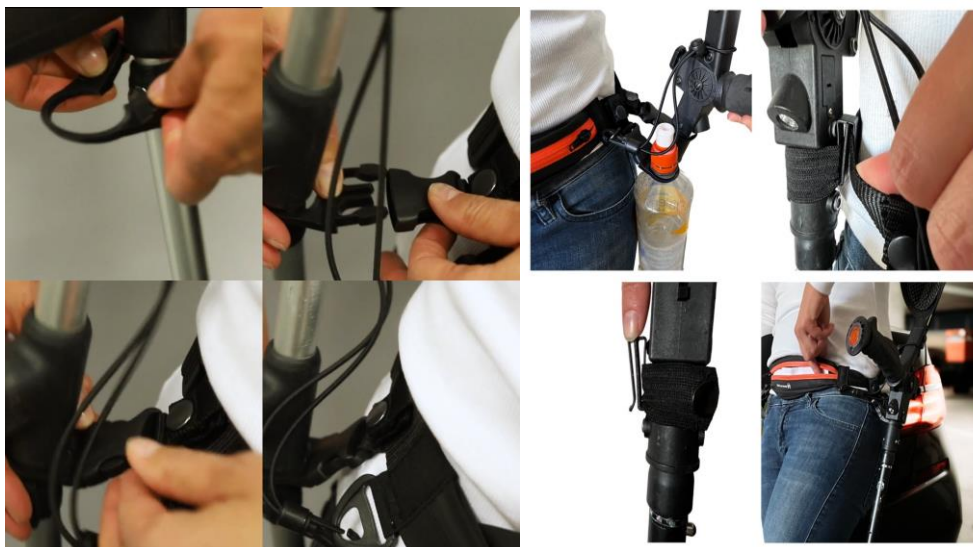

Scan QR koden med mobil for å komme til video på youtube.

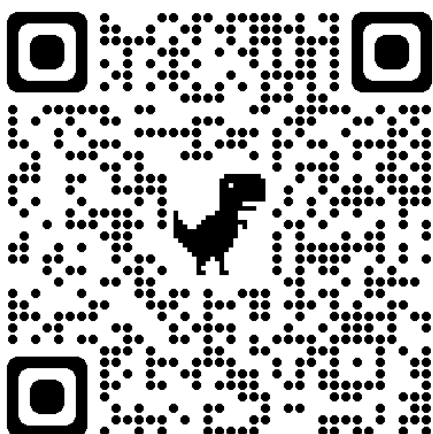

For videoer og brosjyre besøk Hjelpemiddeldatabasen [www.hjelpemiddeldatabasen.no](http://www.hjelpemiddeldatabasen.no) hos NAV og søk på AKA Free Hands.